




Guide de démarrage rapide



EOLife Connect est disponible iOS et Android.
Restez connectés pour être informés des futures mises à jour de l'application

ÉCRAN D'ACCUEIL

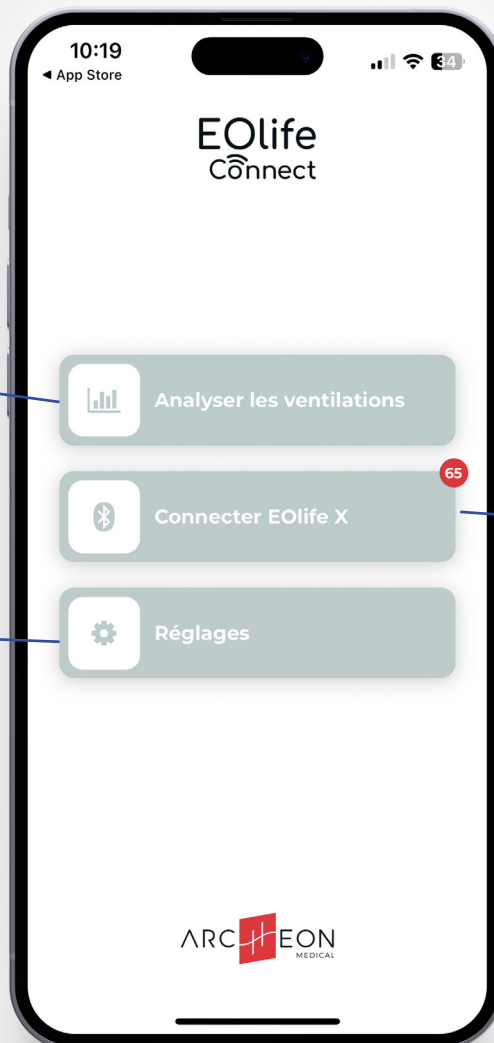

B

Analyse les sessions de ventilations téléchargées (page 8)

C

Paramètres (page 14)

A

Télécharger les sessions depuis un EOLife X (page 4)


A

01. TÉLÉCHARGEMENT DE SESSIONS

1

Sélectionner votre EOLife X.

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur 'scanner'

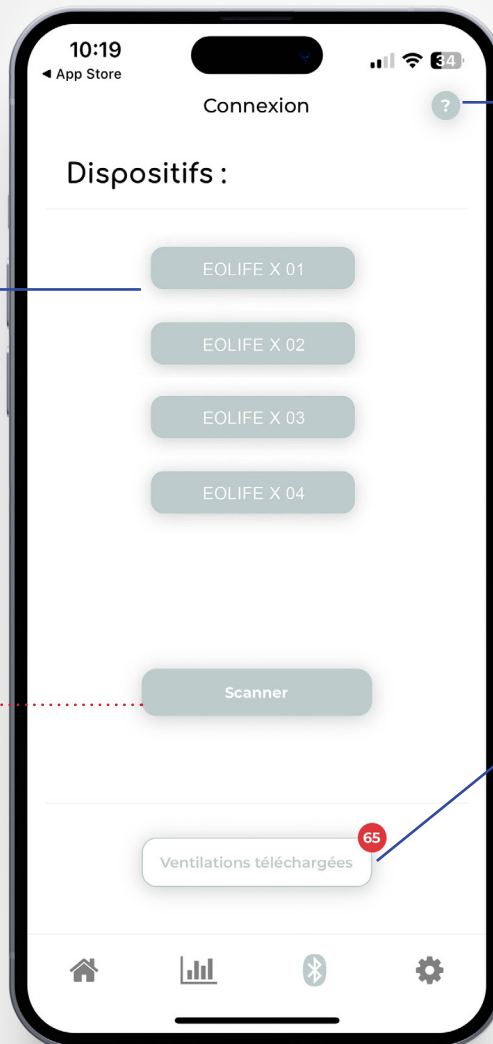

Procédure de téléchargement (page 5)

2

Télécharger toutes les sessions de ventilation de votre EOLife X



ATTENTION !

Une fois importées dans EOLife Connect, toutes les sessions seront effacées de votre EOLife X

02.PROCÉDURE DE TÉLÉCHARGEMENT

Le Bluetooth et la position doivent être activés pour utiliser l'application.



A

03.SESSIONS TÉLÉCHARGÉES

1

Sélectionner une session. Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Filtrer la liste

2

Attribuer la session à un utilisateur (page 7)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer toutes les sessions (actives et non actives)

Supprimer la session (seulement en sélection unique)

The image displays two screenshots of a mobile application interface for managing ventilation sessions. The top screenshot shows a list of sessions under the heading 'Ventilations téléchargées'. A filter bar is visible with options for 'Numéro de série', 'Date', 'Durée', and 'Score'. A list of sessions is shown with columns for 'NS dispositif', 'Date', 'Heure', 'Durée', and 'Conforme'. The first session is selected, indicated by a red circle. A red button labeled 'Supprimer tout' is at the bottom right. The bottom screenshot shows a detailed view of a session with columns for 'EOlife X000...15/06/23', '15:50', '00:00:26', '100%', and a delete icon. A red button labeled 'Supprimer la session' is at the bottom right.

NS dispositif	Date	Heure	Durée	Conforme
EOlife X0...	22/09/23	10:02	00:00:27	100%
EOlife X0...	22/09/23	10:01	00:00:05	100%
EOlife X0...	08/06/23	11:24	00:00:30	100%
EOlife X0...	08/06/23	11:23	00:00:33	66%

EOlife X000...15/06/23	15:50	00:00:26	100%	
EOlife X000...15/06/23	15:48	00:00:32	0%	
EOlife X000...15/06/23	15:48	00:01:21	92%	
EOlife X000...15/06/23	15:47	00:00:40	0%	
EOlife X000...15/06/23	15:45	00:00:51	0%	
EOlife X000...15/06/23	15:41	00:03:58	100%	

04.ATTRIBUER UN UTILISATEUR

Sélectionner un utilisateur existant

10:21
App Store

< Assigner un utilisateur

Cette ventilation a été enregistrée le **22 septembre 2023** à **09:59**.
C'était une ventilation en mode **continu** et **monitoré**, sur un patient de taille **moyen** et de type **adulte**.

+
Créer un utilisateur

Personne
Sélectionner un utilisateur existant

Home Bar Chart Bluetooth Settings

Ou créer un nouvel utilisateur

10:21
App Store

< Créer un nouvel utilisateur

Prénom *
Prénom

Nom *
Nom

Age
Age

Genre
Genre

Profession
Profession

Etablissement
Etablissement


Années d'expériences
Années d'expériences

Sauvegarder

Home Bar Chart Bluetooth Settings

B

01.SESIONS ATTRIBUÉES

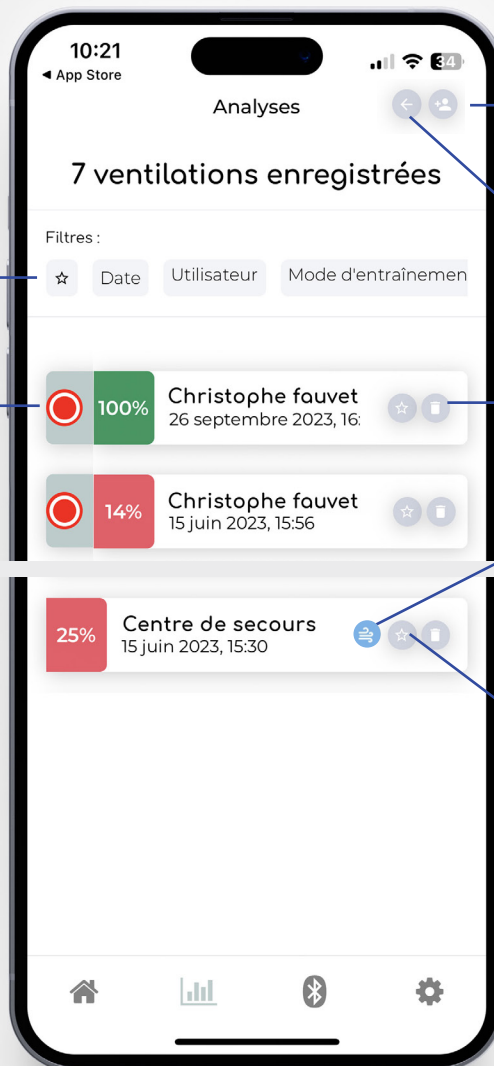

Filtrer la liste

Sélectionner une session pour plus de détails.
(page 9)

Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Télécharger le fichier CSV de la (les) session(s) choisie(s)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer la session

L'icône  indique que la session de ventilation a été réalisée avec l'option 'alarmes de fuites éteintes'. C'est pourquoi seul le Vi est affiché.

Ajouter la session aux Favoris

02.DÉTAILS DE SESSION

B

10:24
App Store

Christophe Fauvet

Type	Taille	Mode	Entrainement
Adulte	Moyen	Continu	Monitré

SCORE 100%

FRÉQUENCE MOYENNE 12/min

VT MOYEN 447 mL

DURÉE 00:00:33

NOMBRE D'ENREGISTREMENTS 2

Exporter le CSV de la session (page 10)

Assigner à un utilisateur

Paramètres de la session

Analyse de la qualité de ventilation (page 11)

Fréquences de ventilation (page 12)

Détails des volumes (page 13)

Durée de la session

Appuyez pour plus de détails

Voir la progression de l'élève (page 10)


B

03.EXPORTER LES SESSIONS (CSV)

Firstname	Lastname	Age	Date	Time	Patient Type	Patient Size	Mode	Training	FrequencyMode	Leakage alarm	EOLife
Archeon	Medical	30	16/09/24	13:55:00	adult	Medium	Continuous	Monitored	ERC	ON	EOLife X0001206
Cycle number	Time (s)	Ti (ms)	Te (ms)	Tp (ms)	Freq (/min)	Vi (mL)	Vt (mL)	Leakage (mL)	Leakage ratio (%)		
1	0:00:00	720	840	100	36	423	423	0	0		
2	0:00:01	780	900	60	34	433	433	0	0		
3	0:00:03	820	900	60	33	448	448	0	0		
4	0:00:05	878	858	20	34	432	432	0	0		
5	0:00:06	911	871	0	33	419	419	0	0		
6	0:00:08	917	920	20	32	428	428	0	0		
7	0:00:10	879	976	3244	11	442	442	0	0		
8	0:00:15	832	966	2256	14	393	393	0	0		
9	0:00:19	644	350	0	60	386	370	16	4		
10	0:00:20	533	386	0	60	248	248	0	0		
11	0:00:21	499	454	0	60	229	229	0	0		
12	0:00:22	486	511	0	60	220	220	0	0		
13	0:00:23	437	538	0	50	209	209	0	0		
14	0:00:24	489	834	80	42	284	284	0	0		
15	0:00:25	878	420	0	46	443	433	10	2		
16	0:00:27	746	364	0	54	386	386	0	0		
17	0:00:28	684	409	0	54	328	328	0	0		
18	0:00:29	752	1344	1002	19	265	265	0	0		
19	0:00:32	995	271	0	47	376	288	88	23		
20	0:00:33	594	1144	433	27	238	238	0	0		
21	0:00:36	1133	944	145	27	397	397	0	0		

- **Cycle number** : Numéro du cycle de ventilation
- **Time** : Durée relative du cycle de ventilation
- **Ti (ms)** : Temps du cycle d’insufflation
- **Te (ms)** : Temps du cycle d’expiration
- **Tp (ms)** : Temps de pause en fin d’expiration dans le cycle de ventilation
- **Freq (min-1)** : Fréquence de ventilation (Moyenne des derniers cycles de ventilation)
- **Vi (mL)** : Volume insufflé pendant le cycle de ventilation
- **Vt (mL)** : Volume courant mesuré pendant l’expiration durant le cycle de ventilation
- **Leakage (mL)** : Volume de fuites pendant le cycle de ventilation
- **Leakage ratio (%)** : Pourcentage de fuites pendant le cycle de ventilation


04.PROGRESSION DE L'ÉLÈVE

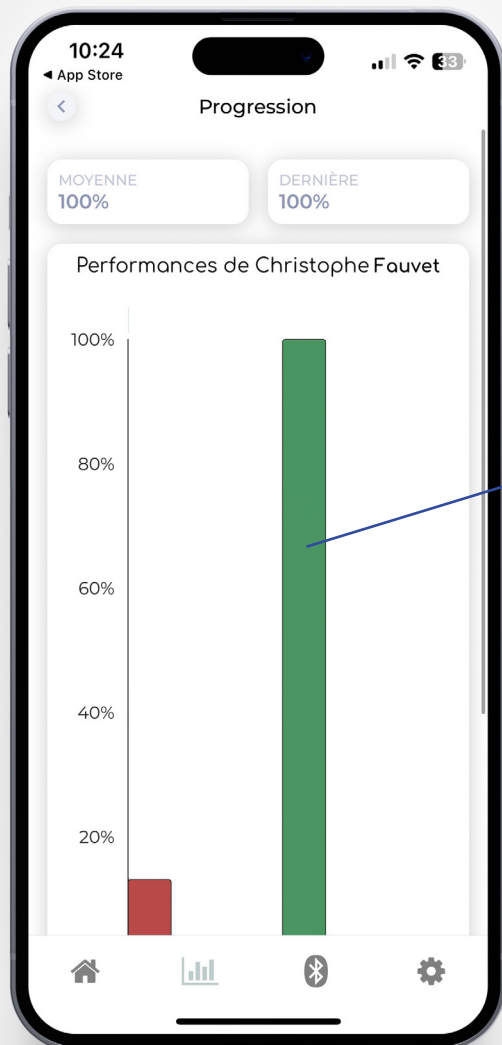B

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique

Appuyez sur la barre pour plus de détails


Visualisez la qualité de la ventilation pendant les sessions.

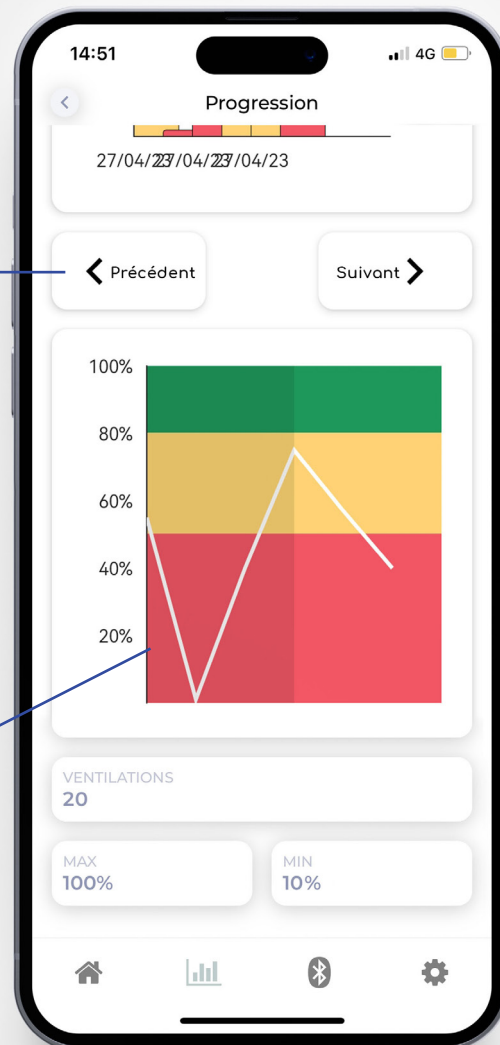

B


05.ANALYSE DE LA QUALITÉ DE VENTILATION

Appuyez pour voir le pourcentage de chaque alarme

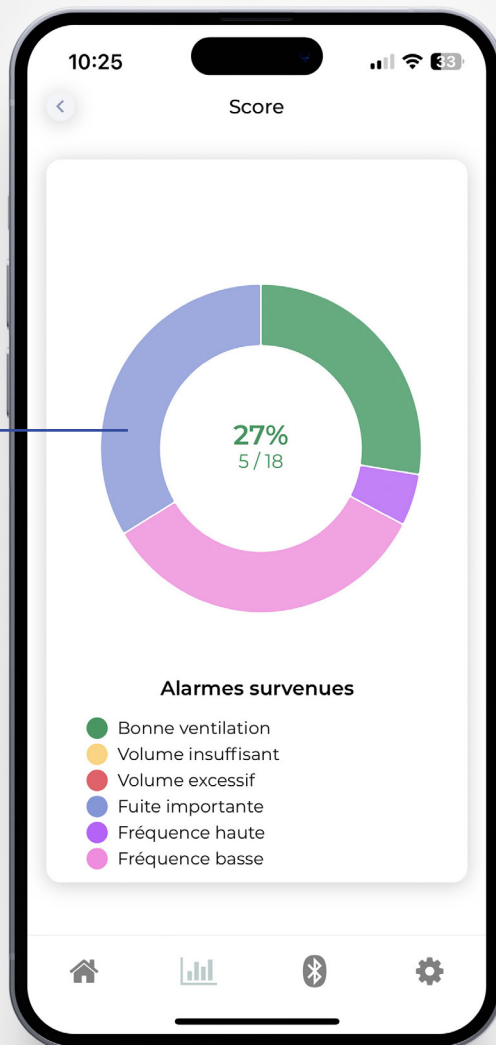


06.FRÉQUENCE DE VENTILATION

B

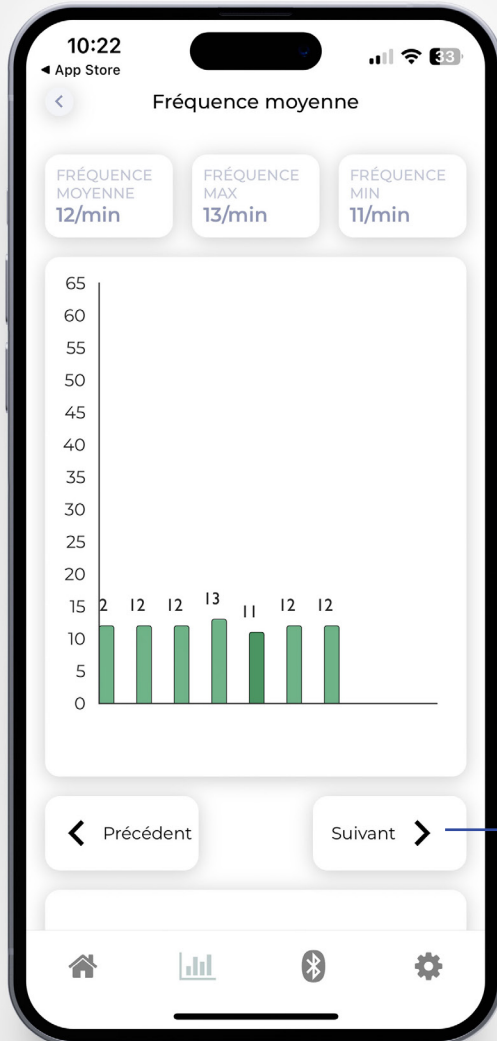

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique

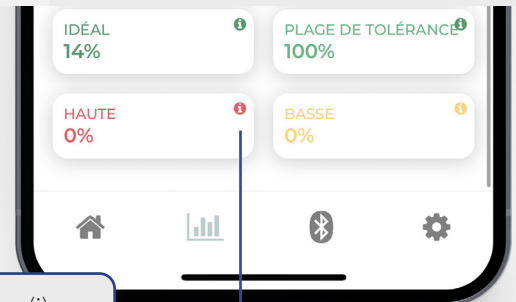


Appuyez sur (i) pour obtenir plus d'informations sur les résultats




B


07.DÉTAILS DES VOLUMES

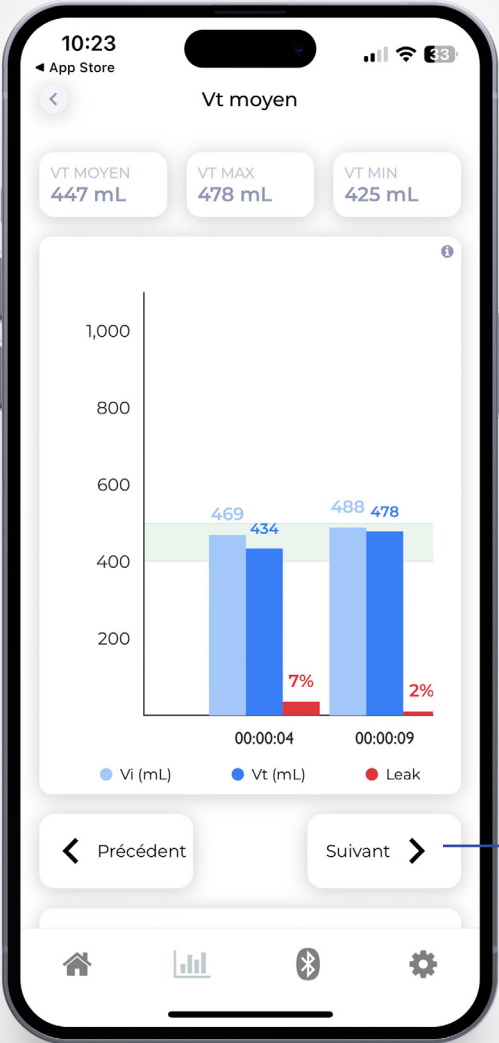

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique

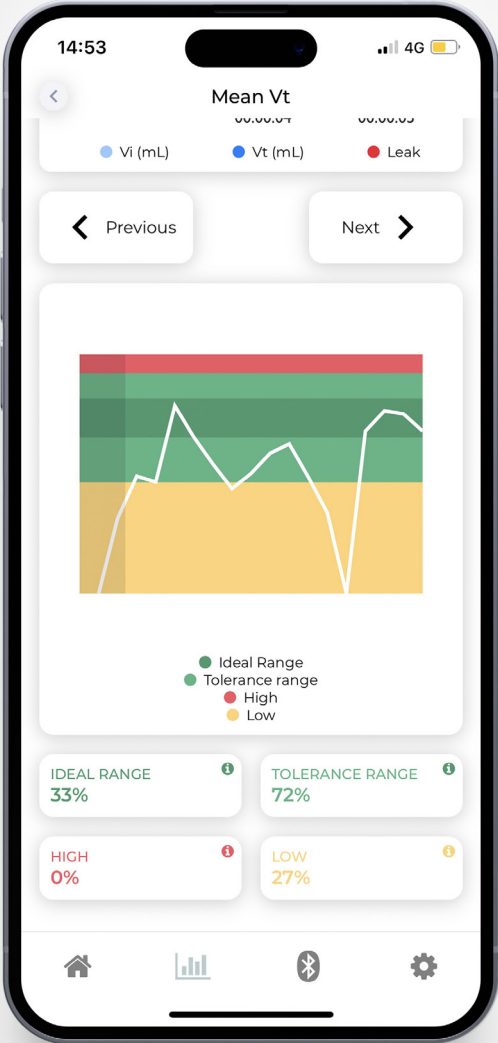


01. RÉGLAGES

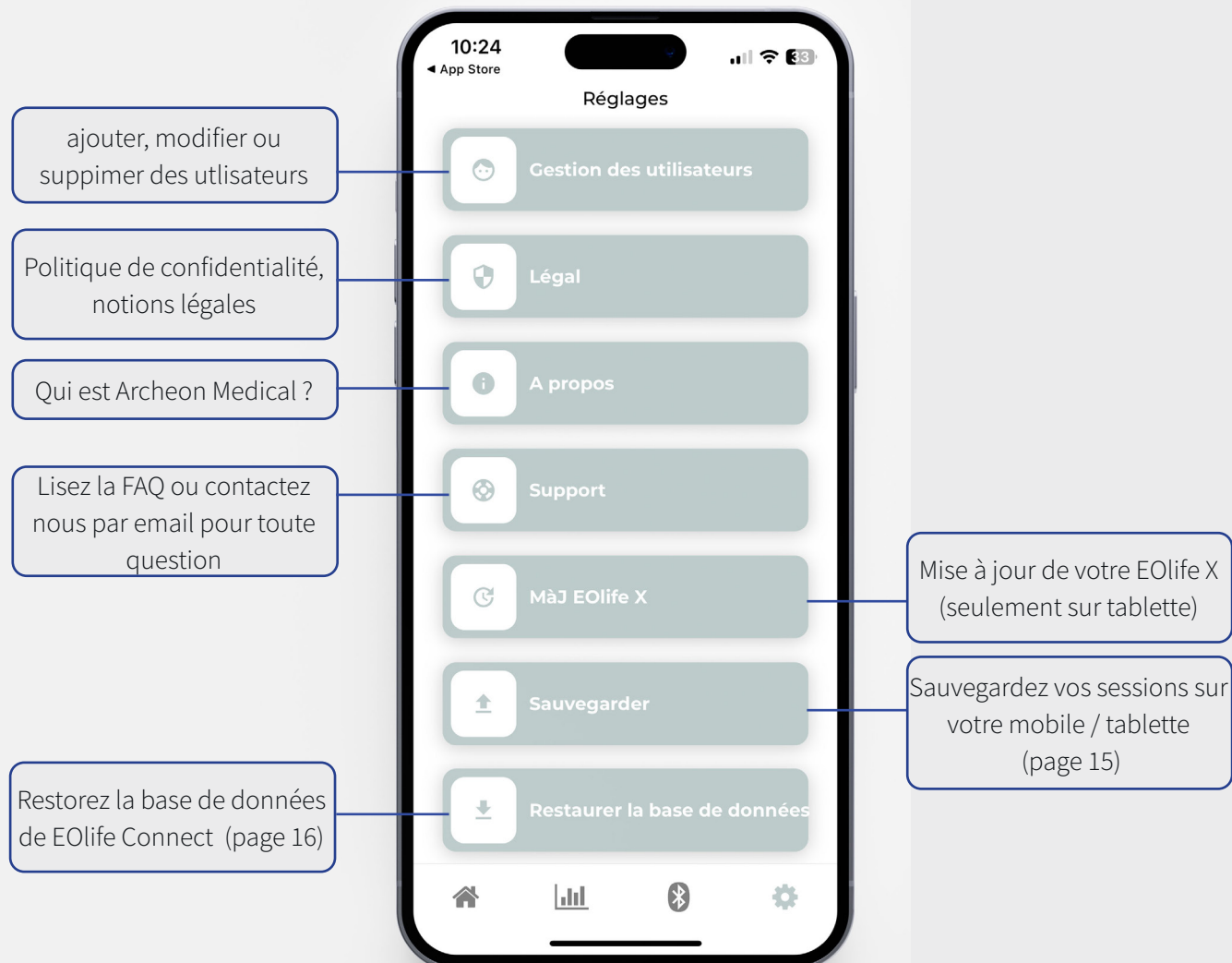

C

02.SAUEGARDE DES DONNÉES

Cette manipulation peut être faite avant de changer de matériel.

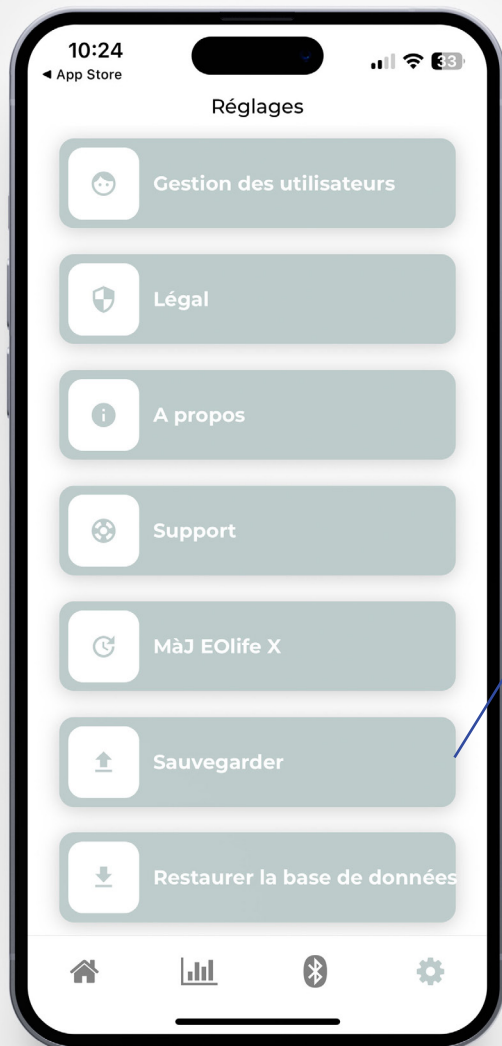


Appuyez sur 'Sauvegarder' et sur 'Oui'

Votre base de données EOlifex Connect sera sauvegardée sur votre mobile/tablette dans un dossier spécifique, sous le nom:
`eolifex-connect-db-backup-{année}-{mois}-{jour}-{heure}.json`



03.RESTAURER LA BASE DE DONNÉES

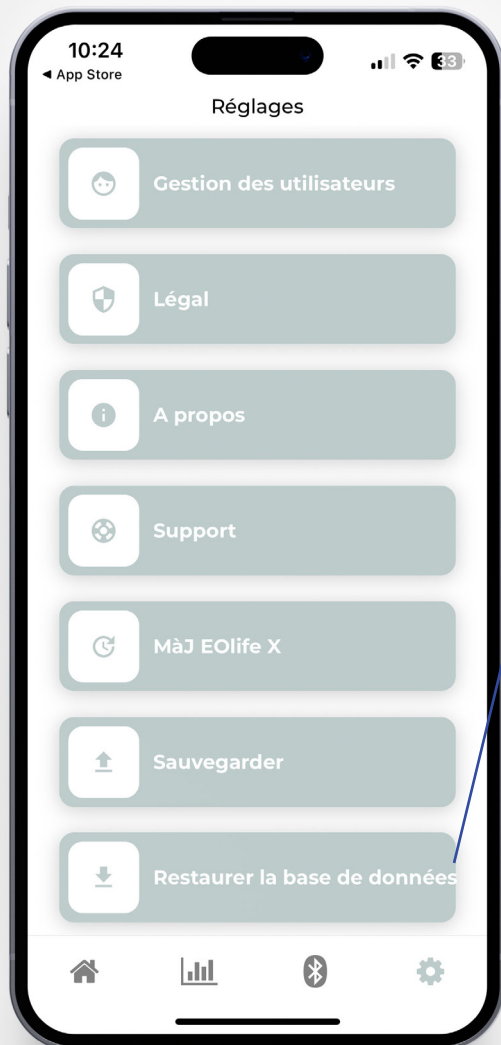

Appuyez sur 'Restaurer la base de données' et sur 'Oui'. Sélectionnez un fichier 'json' sur votre mobie/tablette.



ATTENTION !

Votre base de données EOLife Connect sera écrasée par les données importées. Assurez-vous de réaliser une sauvegarde avant de restaurer la base de données.





Copyright © 2023 Archeon Medical - Tous droits réservés

Photos et copies d'écran : Archeon Medical.

Version : 03 FR - MAI 2025

Archeon Medical - 2 chemin des aiguillettes - 25000 Besançon (FRANCE) - Tel +33 (0)3 81 66 23 80 - www.archeon-medical.com

R.C.S. Besançon 835 009 465 - Document distribué au format électronique.