




Guide de démarrage rapide



EOLife Connect est disponible iOS et Android.
Restez connectés pour être informés des futures mises à jour de l'application

ÉCRAN D'ACCUEIL

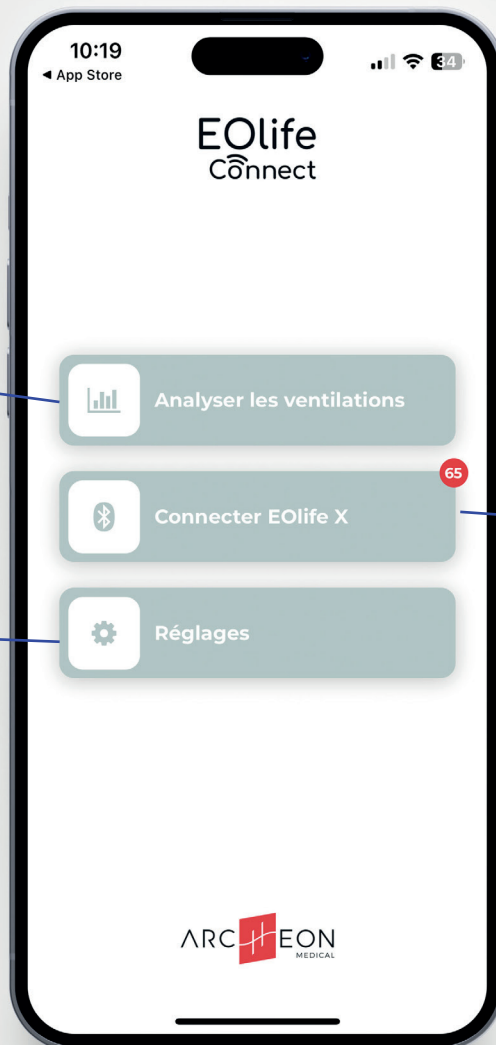

B

Analyse les sessions de ventilations téléchargées (page 8)

C


Paramètres (page 14)

A

Télécharger les sessions depuis un EOLife X (page 4)

A

01. TÉLÉCHARGEMENT DE SESSIONS

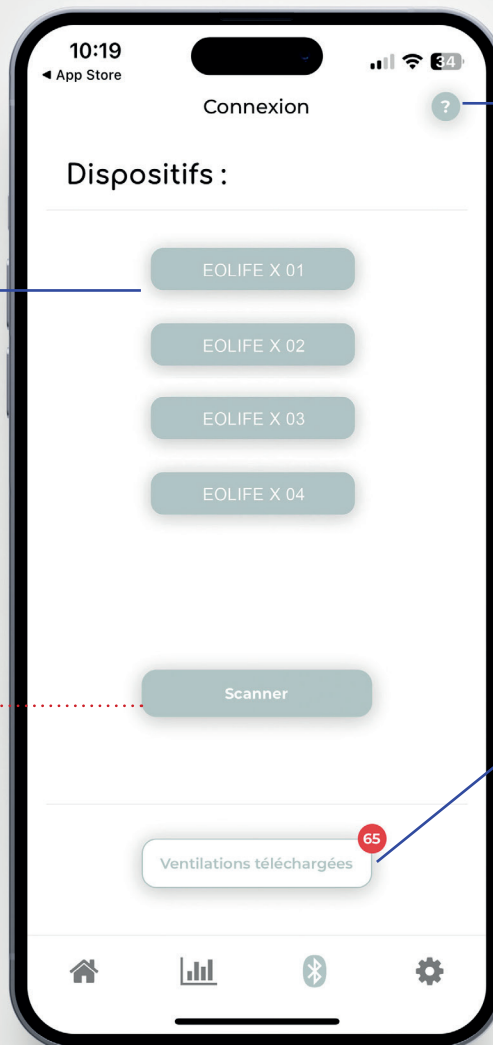

1

Sélectionner votre EOLife X.

Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur 'scanner'

Procédure de téléchargement (page 5)

2

Télécharger toutes les sessions de ventilation de votre EOLife X



ATTENTION !

Une fois importées dans EOLife Connect, toutes les sessions seront effacées de votre EOLife X

02.PROCÉDURE DE TÉLÉCHARGEMENT

A



A

03.SESSIONS TÉLÉCHARGÉES

1

Sélectionner une session. Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Filtrer la liste

2

Attribuer la session à un utilisateur (page 7)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer toutes les sessions (actives et non actives)

Supprimer la session (seulement en sélection unique)

10:20

App Store

Ventilations téléchargées

Filtres :

Numéro de série

Date

Durée

Score

NS dispositif

Date

Heure

Durée

Conforme

EOlife X0... 22/09/23

10:02

00:00:27

100%

EOlife X0... 22/09/23

10:01

00:00:05

100%

EOlife X0... 08/06/23

11:24

00:00:30

100%

EOlife X0... 08/06/23

11:23

00:00:33

66%

Supprimer tout

EOlife X000...15/06/23

15:50

00:00:26

100%

EOlife X000...15/06/23

15:48

00:00:32

0%

EOlife X000...15/06/23

15:48

00:01:21

92%

EOlife X000...15/06/23

15:47

00:00:40

0%

EOlife X000...15/06/23

15:45

00:00:51

0%

EOlife X000...15/06/23

15:41

00:03:58

100%

04.ATTRIBUER UN UTILISATEUR

A


Sélectionner un utilisateur existant

10:21
App Store

< Assigner un utilisateur

Cette ventilation a été enregistrée le **22 septembre 2023 à 09:59**.
C'était une ventilation en mode **continu** et **monitoré**, sur un patient de **taille moyen** et de **type adulte**.

+
Créer un utilisateur


Sélectionner un utilisateur existant

Home Bar: Home, Bar Chart, Bluetooth, Settings

Ou créer un nouvel utilisateur

10:21
App Store

< Créer un nouvel utilisateur

Prénom *
Prénom

Nom *
Nom

Age
Age

Genre
Genre

Profession
Profession

Etablissement
Etablissement

Années d'expériences
Années d'expériences

Sauvegarder

Home Bar: Home, Bar Chart, Bluetooth, Settings

B

01.SESIONS ATTRIBUÉES

The image shows a smartphone screen displaying the 'Analyses' app. The screen shows a list of 7 recorded ventilations. The interface includes a top bar with the time 10:21, a back arrow, and a user icon. Below the title 'Analyses', it says '7 ventilations enregistrées'. There are filter buttons: a star icon, 'Date', 'Utilisateur', and 'Mode d'entraînement'. The list shows three items: 'Christophe fouvet' with 100% completion, 'Christophe fouvet' with 14% completion, and 'Centre de secours' with 25% completion. Each item has a star icon and a trash icon. A blue callout box points to the first item, indicating it can be selected for more details. Another blue callout box points to the trash icon of the first item, indicating it can be deleted. A third blue callout box points to the user icon in the top bar, indicating it can be used to download a CSV file. A fourth blue callout box points to the star icon of the first item, indicating it can be added to favorites. A fifth blue callout box points to the star icon of the third item, indicating it was created with the 'alarms de fuites éteintes' option.

10:21
App Store

Analyses

7 ventilations enregistrées

Filtres : ☆ Date Utilisateur Mode d'entraînement

100% Christophe fouvet
26 septembre 2023, 16:

14% Christophe fouvet
15 juin 2023, 15:56

25% Centre de secours
15 juin 2023, 15:30

Filtrer la liste

Sélectionner une session pour plus de détails. (page 9)
Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions en maintenant l'appui.

Télécharger le fichier CSV de la (les) session(s) choisie(s)

Désactiver la sélection multiple

Supprimer la session

L'icône 🚫 indique que la session de ventilation a été réalisée avec l'option 'alarmes de fuites éteintes'. C'est pourquoi seul le Vi est affiché.

Ajouter la session aux Favoris

02.DÉTAILS DE SESSION

B

The screenshot shows the 'Christophe Fauvet' session details screen. At the top, there's a status bar with the time 10:24 and 'App Store' link. Below the name, a header bar contains four tabs: 'Type', 'Taille', 'Mode', and 'Entrainement', with sub-labels 'Adulte', 'Moyen', 'Continu', and 'Monitoré' respectively. The main content area displays five key metrics: 'SCORE 100%' with a green circular icon, 'FRÉQUENCE MOYENNE 12/min' with an hourglass icon, 'VT MOYEN 447 mL' with a lung icon, 'DURÉE 00:00:33' with a clock icon, and 'NOMBRE D'ENREGISTREMENTS 2' with a microphone icon. A bottom bar contains four icons: a home icon, a bar chart, a Bluetooth symbol, and a settings gear. Callouts point to various elements: 'Paramètres de la session' points to the header bar; 'Analyse de la qualité de ventilation (page 11)' points to the SCORE metric; 'Fréquences de ventilation (page 12)' points to the FRÉQUENCE MOYENNE metric; 'Détails des volumes (page 13)' points to the VT MOYEN metric; 'Durée de la session' points to the DURÉE metric; 'Télécharger le CSV de la session' points to the download icon in the top right; 'Assigner à un utilisateur' points to the edit icon in the top right; and 'Voir la progression de l'élève (page 10)' points to the microphone icon in the bottom right. A blue button at the bottom left says 'Appuyez pour plus de détails'.

Paramètres de la session

Analyse de la qualité de ventilation (page 11)

Fréquences de ventilation (page 12)

Détails des volumes (page 13)

Durée de la session

Télécharger le CSV de la session


Assigner à un utilisateur

Appuyez pour plus de détails

Voir la progression de l'élève (page 10)

B


03.PROGRESSION DE L'ÉLÈVE

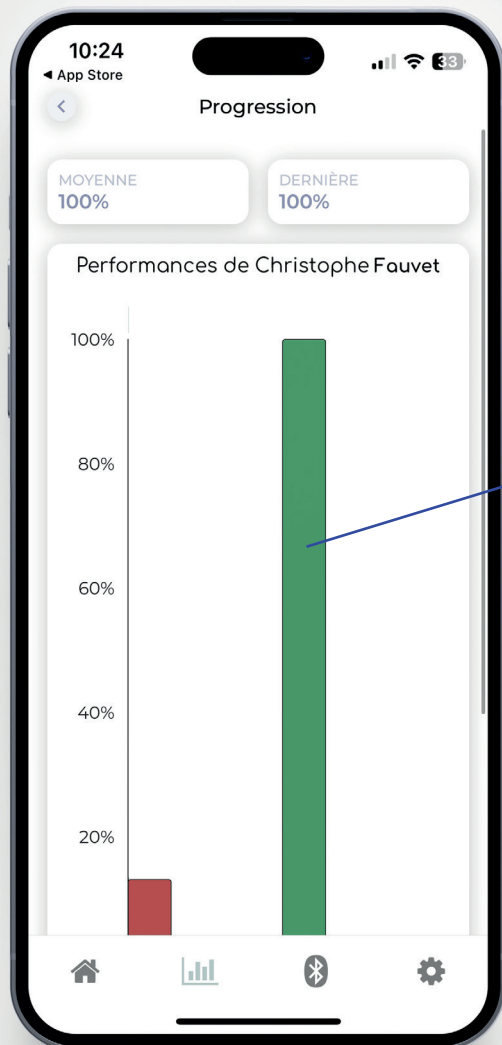

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique


Appuyez sur la barre pour plus de détails

Visualisez la qualité de la ventilation pendant les sessions.

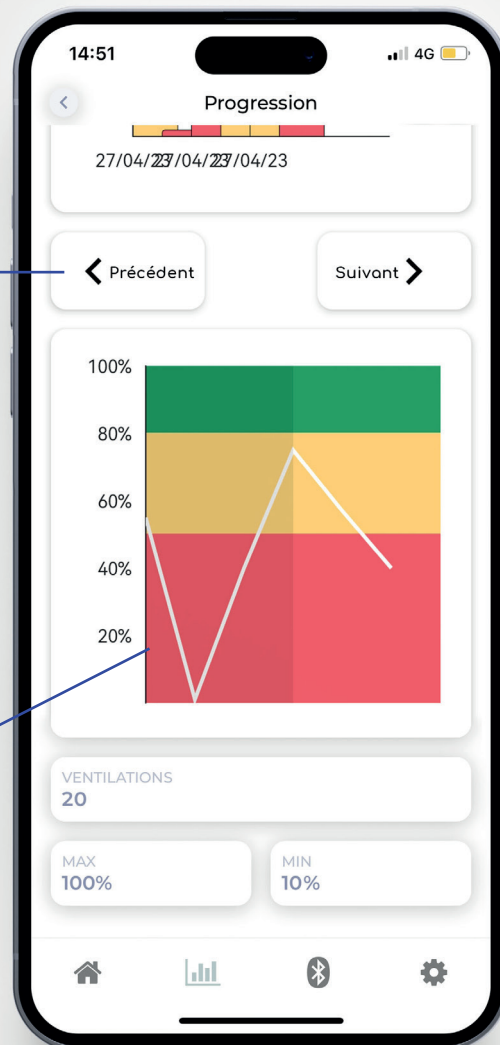


04.ANALYSE DE LA QUALITÉ DE VENTILATION

Appuyez pour voir le pourcentage de chaque alarme

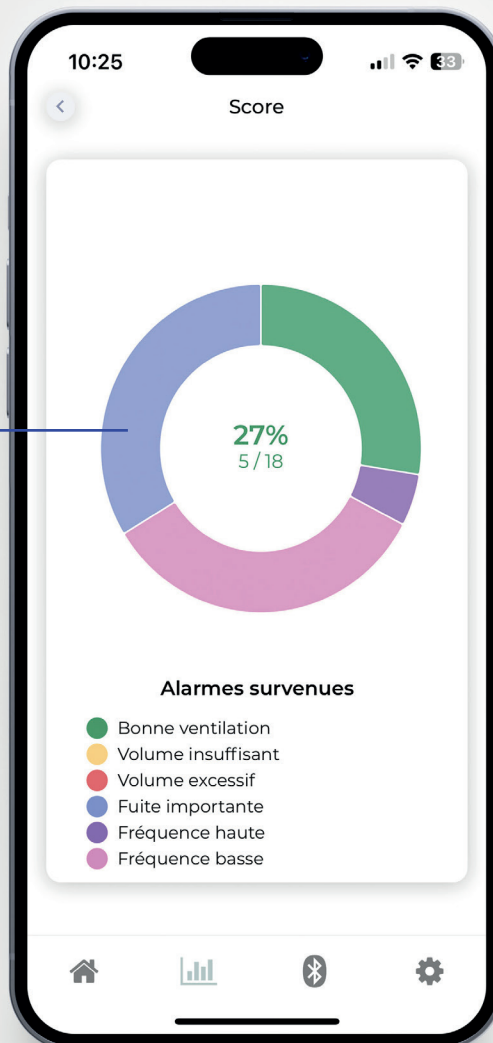


B

05.FRÉQUENCE DE VENTILATION

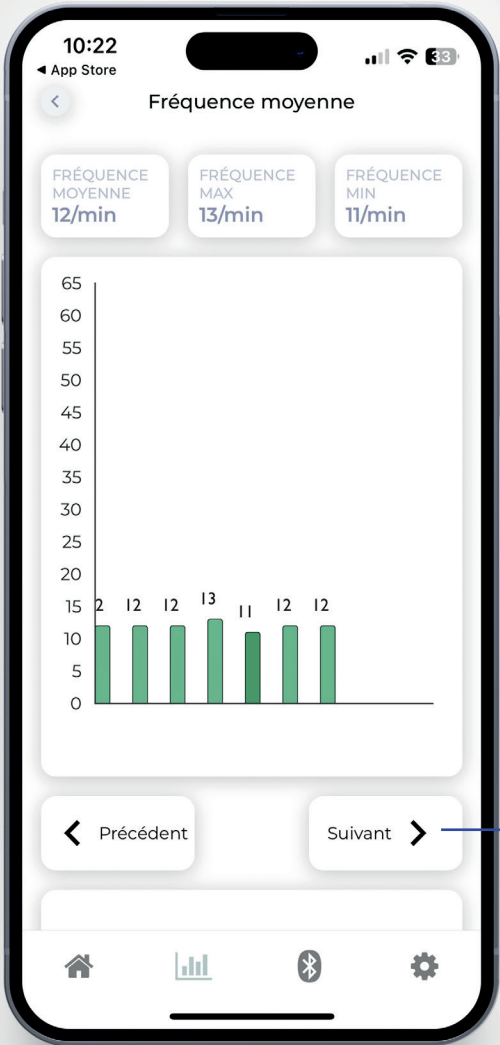


Appuyez sur (i) pour obtenir plus d'informations sur les résultats

Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique

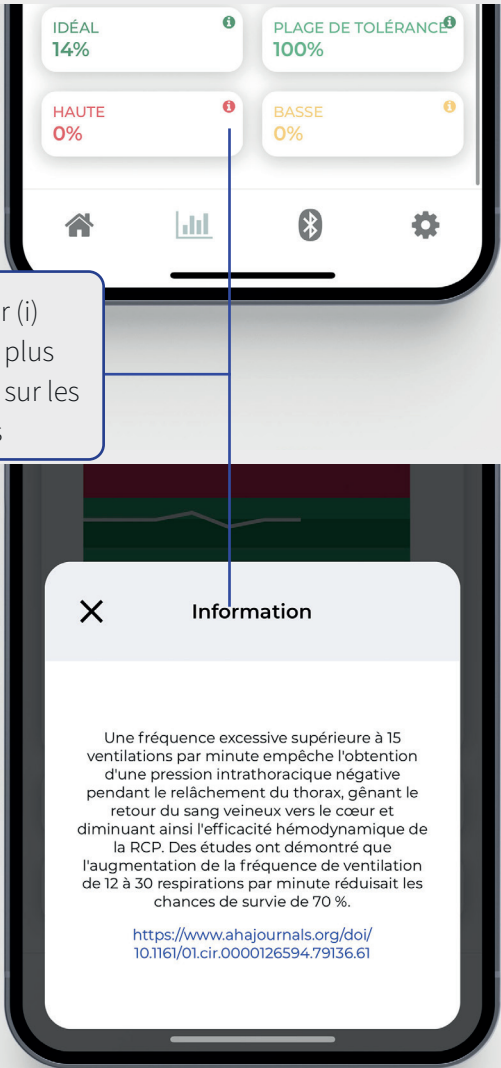

06.DÉTAILS DES VOLUMES

B

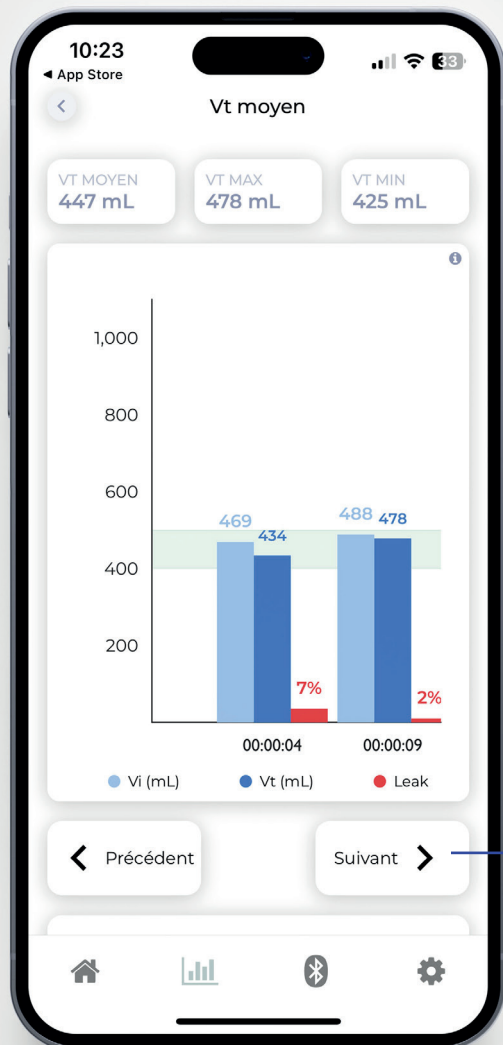


Appuyez sur précédent ou suivant pour vous déplacer dans le graphique



C


01.RÉGLAGES

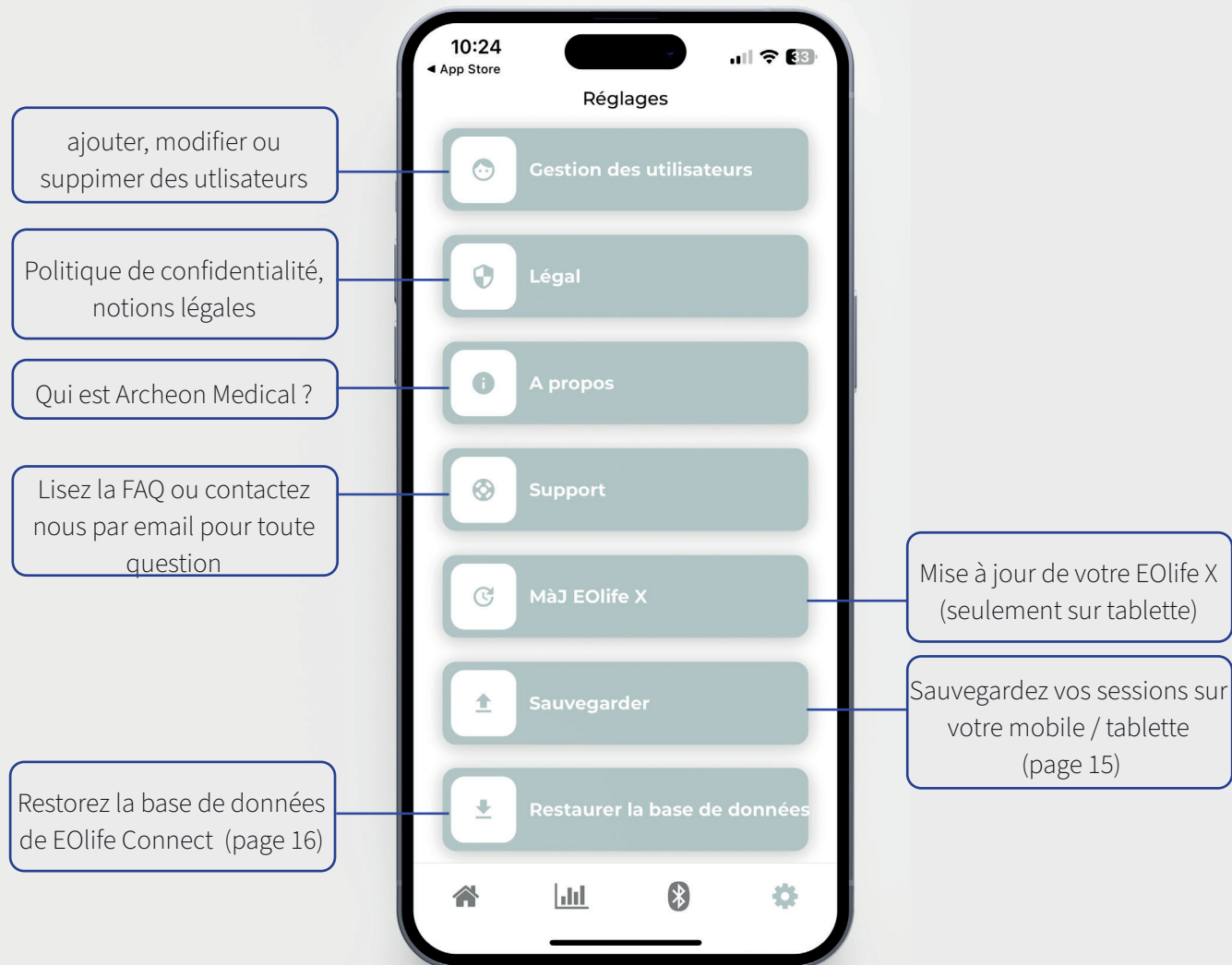

02.SAUEGARDE DES DONNÉES

C

Cette manipulation peut être faite avant de changer de matériel.

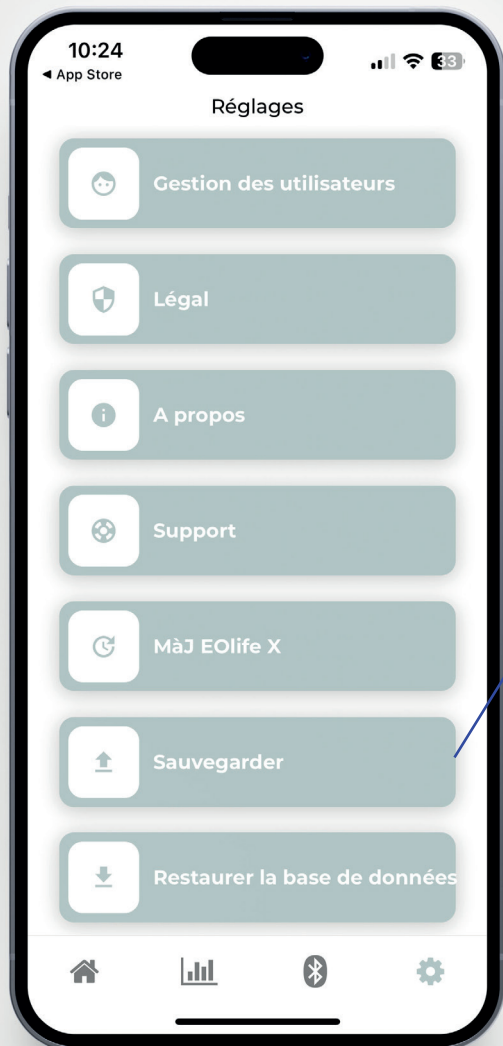


Appuyez sur 'Sauvegarder' et sur 'Oui'

Votre base de données EOLife Connect sera sauvegardée sur votre mobile/tablette dans un dossier spécifique, sous le nom:
`eolife-connect-db-backup-{année}-{mois}-{jour}-{heure}.json`



C

03.RESTAURER LA BASE DE DONNÉES

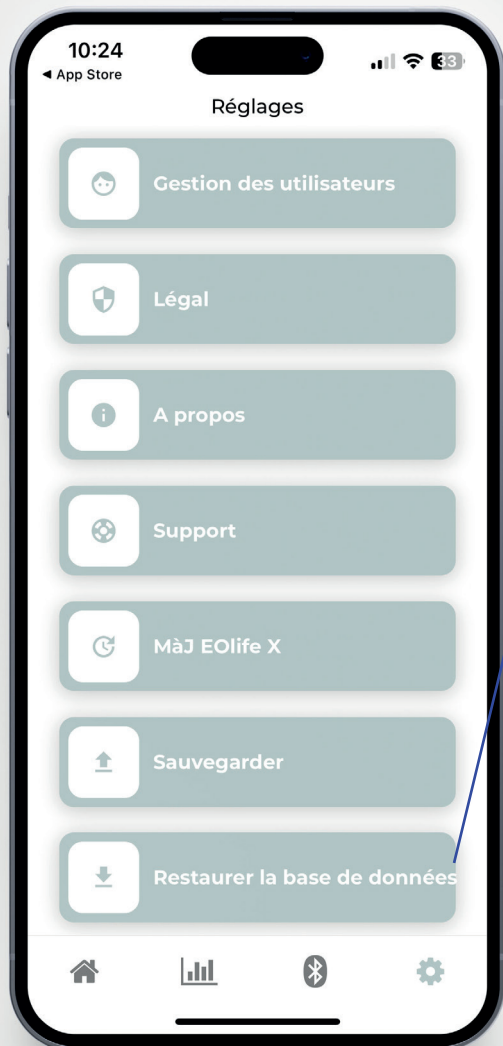

Appuyez sur 'Restaurer la base de données' et sur 'Oui'. Sélectionnez un fichier 'json' sur votre mobile/tablette.



ATTENTION !

Votre base de données EOLife Connect sera écrasée par les données importées. Assurez-vous de réaliser une sauvegarde avant de restaurer la base de données.





Copyright © 2023 Archeon Medical - Tous droits réservés

Photos et copies d'écran : Archeon Medical.

Version : Ver01fr - Novembre 2023

Archeon Medical - 2 chemin des aiguillettes - 25000 Besançon (FRANCE) - Tel +33 (0)3 81 66 23 80 - www.archeon-medical.com

R.C.S. Besancon 835 009 465 - Document distribué au format électronique.